

ПРОТОКОЛ
забора образцов клеток буккального эпителия(или ногтей)

от «__» _____ 20__ г.

На основании определения _____ суда от
«__» _____ 20__ г. в зале заседания суда был осуществлен забор образцов клеток
буккального эпителия с внутренней стороны щеки ватной палочкой (или ногтей обычными
ножницами)

у:

1. _____
(Ф.И.О. матери полностью, дата рождения)
2. _____
(Ф.И.О. ребёнка полностью, дата рождения)
3. _____
(Ф.И.О. отца полностью, дата рождения)

Забор образцов осуществлялся лицами, участвующими в деле самостоятельно в присутствии:

4. _____
(должность, Ф.И.О.)
5. _____
(должность, Ф.И.О.)
6. _____
(должность, Ф.И.О.)

По статьям 307, 308 УК РФ предупреждены

Подписи представителей сторон(свидетелей):

4. _____ 5. _____ 6. _____

Судья _____ / _____

М.П.

Инструкция по забору образцов клеток буккального эпителия

1. Приобрести стандартные гигиенические ватные палочки. Используйте только новую, не вскрывавшуюся ранее, упаковку.
2. Человек, у которого будет проводиться забор образцов, должен прополоскать рот чистой кипячёной водой.
3. Взять ватную палочку за один конец и провести 20-30 раз противоположным концом палочки по внутренней поверхности щеки с лёгким нажимом для соскабливания эпителиальных клеток.
4. Отрезать и выбросить конец палочки, за который держались рукой.
5. Оставшуюся половину палочки, не высушивая опустить сразу в бумажный конверт, а затем, объединив пакеты с образцами клеток от всех участников экспертизы опустить в один бумажный конверт большего размера. Не допускается использовать полиэтиленовые пакеты! От каждого человека необходимо предоставить по две ватные палочки с образцами буккального эпителия. Образцы от разных людей должны быть в отдельных конвертах для исключения взаимного переноса биологического материала. Все конверты снабжаются идентифицирующими надписями (ФИО, дата, подпись) и отправляются в экспертное учреждение.